

# INFORMAÇÃO AO PACIENTE QUANDO OS DENTES AMOLECEM

Periodontite



# OS TRATAMENTOS DENTÁRIOS SÃO UMA QUESTÃO DE CONFIANÇA

## NOSSA EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA SÃO ALGO EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR

Mais de 10 milhões de pacientes no mundo inteiro têm sido tratados com biomateriais Geistlich. Permita-nos compartilhar com você alguns fatos sobre esses produtos:

- › Os produtos Geistlich são biomateriais suíços de qualidade superior e cientificamente comprovada.
- › A seleção meticulosa das matérias-primas, juntamente com um processo de produção rigorosamente controlado, faz com que os biomateriais

## BIOMATERIAIS GEISTLICH

- › Sua referência n.º 1 no mundo todo<sup>1,2</sup>
- › Excelente qualidade<sup>3,4</sup>
- › Biofuncionalidade única<sup>5-8</sup>

Geistlich atendem aos mais altos requisitos de segurança e asseguram uma alta tolerabilidade.

- › Esses biomateriais naturais foram avaliados em mais de 1.000 estudos conduzidos em vários países.
- › A segurança dos produtos foi avaliada por autoridades nacionais e internacionais.

## POR QUE UM TRATAMENTO É IMPORTANTE?

### RETENÇÃO DO DENTE COM MEDIDAS REGENERATIVAS

#### Retenção de seu dente natural

Prevenção de soluções artificiais (implantes, pontes).

#### Resultados estáveis

Você recebe de volta seu conforto habitual e evita a mobilidade do dente.

### NO CASO DE PERDA DE DENTE

#### Regeneração óssea para prótese dental final

Flexibilidade na escolha de soluções postizas (implantes, pontes, etc.).

#### Resultados estáveis

Medidas preventivas conduzidas após a perda de dente poupam tempo e dinheiro a longo prazo prevenindo procedimentos de enxerto adicionais.<sup>9</sup>

### VOLTE A SORRIR



Resultados esteticamente agradáveis e preservação da saúde dental.

Dr. Bröseler (Aachen, Alemanha)

# POR QUE VOCÊ TEM PERIODONTITE?

- 1 Sua boca está cheia de bactérias e seus dentes estão constantemente cobertos com bactérias na chamada placa, uma camada aderente e incolor. Limpar com a escova e o fio dental ajuda a livrar-se das bactérias orais.
- 2 A placa que não for removida é nociva para seus dentes. As gengivas ao redor de seus dentes e nos espaços entre os dentes ficam infectadas (periodontite).
- 3 Não tratando a periodontite, seus dentes podem ficar moles devido à degradação do osso ao redor dos dentes. Dependendo do grau de infecção (periodontite), pode ser necessário extrair os dentes.



Um dente afetado por periodontite leva a degradação óssea a longo prazo.

## Dente perdido▶ Extração do dente



Um dente com grau avançado de periodontite pode precisar ser extraído. Nesse caso, medidas regenerativas do osso usando Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® podem ser a solução...

## Retenção de dente com medidas regenerativas



Um dente com bom prognóstico pode ser retido mediante a regeneração do osso perdido com o uso de Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide®.



...a fim de assegurar uma restauração adequada como, por exemplo, a instalação de implante.  
Ver o catálogo «Dente perdido – e depois?»



Medidas regenerativas como estas podem levar a retenção duradoura do dente, com efeitos estáveis garantindo o conforto e função do dente.

# BIOMATERIAIS GEISTLICH

Ossos humanos são capazes de regenerar, quer dizer, são capazes de reconstruir osso ausente. Na maioria dos casos, eles precisam ainda ser apoiados por uma estrutura que serve de molde. Os produtos naturais Geistlich apoiam, eficazmente, os processos de regeneração óssea, intrínsecos ao organismo.

## GEISTLICH BIO-OSS® ESTABILIZA E APOIA A REGENERAÇÃO ÓSSEA

- › Proporcionando uma base para seu corpo regenerar o osso.
- › Feito a partir da parte mineral de ossos provenientes de gados australianos e neozelandeses.
- › Qualidade suíça, aprimorada em 30 anos de experiência.

## GEISTLICH BIO-GIDE® PERIO PROTEGE E APOIA A CICATRIZAÇÃO

- › Apoia a cicatrização da ferida e proporciona uma barreira para regeneração ideal do osso.
- › Feito de colágeno extraído de porcos saudáveis.
- › Qualidade suíça, aprimorada em 20 anos de experiência.



# VOLTAR A TER UM SORRISO SAUDÁVEL

Os cuidados pós-operatórios são um fator para o qual o sucesso você pode contribuir.

## O QUE FAZER

- › Mantenha sua higiene oral e use colutório antibacteriano conforme prescrito pelo seu dentista.
  - › Trate um eventual inchaço com compressas frias e úmidas.
  - › Consulte seu dentista em caso de dor.
  - › Agende uma consulta de acompanhamento com seu dentista.
- 
- 

## O QUE NÃO FAZER

- › Não negligencie a higiene oral.
  - › Não limpe a área cirúrgica com escova ou fio dental durante 1 semana após a cirurgia. Normalmente, pode ser usada uma escova com cerdas macias para limpar os dentes ao redor da ferida.
  - › Não beba café ou álcool nem fume durante 2-3 dias após a cirurgia.
- 
- 



Os biomateriais da Geistlich Pharma AG são os biomateriais usados com maior frequência em odontologia regenerativa em todo o mundo:<sup>10</sup>

Mais de 10 milhões

**GEISTLICH BIO-OSS®**



Mais de 4,5 milhões

**GEISTLICH BIO-GIDE®**



Mais de 80.000

**GEISTLICH MUCOGRAFT®**



Mais de 24.000

**GEISTLICH MUCOGRAFT®  
SEAL**



#### Fabricante

© Geistlich Pharma AG  
Business Unit Biomaterials  
Bahnhofstrasse 40  
CH-6110 Wolhusen  
Phone +41 41 492 56 30  
Fax +41 41 492 56 39  
[www.geistlich-biomaterials.com](http://www.geistlich-biomaterials.com)

Informações mais detalhadas  
sobre os nossos distribuidores:



#### Referências

- 1 iData Research Inc., US Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2013
- 2 iData Research Inc., European Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2015
- 3 Certificado segundo ISO 13485, pesquisa e desenvolvimento
- 4 Certificado segundo ISO 9001, gestão de qualidade multi-sítio
- 5 Jung R. et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065-73
- 6 Buser D et al., J Periodontol. 2013 Nov;84(11):1517-27
- 7 Jensen S.S. et al., J Periodontol. 2014 Nov;85(11):1549-56
- 8 Mordenfeld A. et al., Clin Oral Implants Res. 2010 Sep;21(9):961-70
- 9 Cardaropoli D. et al., Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Sep-Oct;35(5):677-85
- 10 Baseado no número de unidades atualmente vendidas. Dados em arquivo (Wolhusen, Suíça)